

INSERTS DE DÉTARTRAGE

Inserts universels : Gamme Scorpion®



FOCUS ↑

La gamme CLiP permet de nettoyer les implants et les restaurations sans changer d'inserts.


L'insert-i a un double usage:

- permet de détartrer les dents naturelles
- permet de détartrer les implants en insérant l'embout peek.

→ CARACTÉRISTIQUES

- Simple et pratique
- Double usage
- Embout peek : polymère biocompatible haute qualité
- Embout peek : nettoyage et détartrage en douceur (intéressant pour les patients sujets à une sensibilité dentaire prononcée)

→ PROTOCOLE

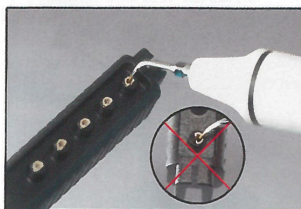

1. Insertion de la pointe de l'insert dans le CLiP




2. Fixation du CLiP sur l'insert




3. Nettoyage à puissance 20% max. sous irrigation et aspiration



4. Retrait du CLiP

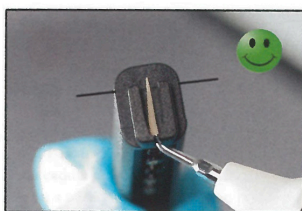

5. Visualisation de l'usure du CLiP: usure correcte

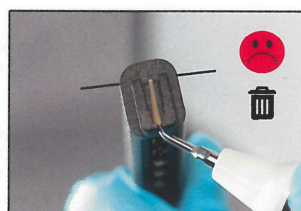

6. Visualisation de l'usure du CLiP: limite d'usure atteinte

→ CONDITIONNEMENTS

Les kit CLiP

Compatible EMS

998601 Kit clip EMS

Compatible Satelec NSK piezo

998600 Kit clip NSK Satelec

Compatible KAVO Piezoled, Piezosoft

998604 Kit clip Kavo Piezoled

Compatible KAVO Piezolux, Sonosoft, Mectron

998603 Kit clip Kavo Sonosoft

Compatible SIRONA Sirosonic

998602 Kit clip Sirona

Les inserts-i

Compatible EMS

998608 I-EM

Compatible Satelec NSK piezo

998607 I-SA

Compatible KAVO Piezoled, Piezosoft

998609 I-KA

Compatible KAVO Piezolux, Sonosoft, Mectron

998610 I-KP

Compatible SIRONA Sirosonic

998611 I-SI

Le réassort

Embouts Clip sachet de 20 pièces

998605 Sachet Clip (x20)

Instrument pour fixer le clip

998606 Clipper

Clefs dynamométriques

998616 Clef I-EM (rouge/intérieur blanc)

998617 Clef I-SA (verte/intérieur blanc)

998618 Clef I-SI (noire/intérieur blanc)

Flashez-moi

