

## Protocole Cavex Alginate Mixer II



### Mode d'emploi:

1. Dosez la quantité de poudre d'alginate et d'eau et transférez-les dans le godet de mélange

Dosage conseillé pour le maxillaire supérieur



Dosage conseillé pour le maxillaire inférieur



2. Toujours mélanger au préalable! Ceci facilite le nettoyage du couvercle du godet de mélange et garantit aussi la longévité de l'appareil.

3. Mettez le couvercle par dessus et placez le tout dans le Cavex Alginate Mixer

4. Fermez et appuyez sur start.

5. Prenez avec la spatule en un mouvement l'alginate et placez-le dans le porte-empriente

### Entretien/nettoyage Cavex Alginate Mixer:

1. Dissoudre un peu de Cavex GreenClean pour élimination d'alginate dans un godet d'eau.
2. A l'aide d'une lingette humidifiée (pas mouillée!) de solution Cavex GreenClean et du bâtonnet d'agitation, l'appareil est facile à nettoyer.
3. Eviter que le Cavex Alginate Mixer ne devienne très sale. Il se formera alors moins de dépôts dans l'appareil.

